



mustangTM

Mustang è un addestratore al cammino ed alla mobilità autonoma con un sistema di stabilizzazione del tronco e del bacino utilizzabile sia in modalità anteriore sia posteriore.





Mustang "Gait Trainer" è un addestratore per il cammino con supporto anteriore/posteriore che garantisce corretto posizionamento e sostegno per l'apprendimento dell'abilità di muovere un passo dopo l'altro e camminare.

È un ausilio molto avanzato per i tutti quei bambini con bisogni speciali, difficoltà di equilibrio e disabilità delle funzioni motorie, che necessitano di assistenza nel cammino quotidiano. Fornisce un sostegno confortevole per la parte superiore del corpo mantenendo il bacino del bambino supportato in maniera non invadente. La possibilità di passare gradualmente da una posizione in ortostatismo ad una con il baricentro anteriorizzato permette un più semplice innesco del movimento di propulsione con un apprendimento "step by step" ed incoraggia i bambini a partecipare alle attività.

Mustang ha una grande varietà di accessori per i bambini che hanno bisogno di un sostegno supplementare; essi sono rimovibili col progredire delle loro abilità motorie.

È stato sviluppato per essere sia un addestratore al cammino con supporto stabilizzante anteriore che con supporto stabilizzante posteriore, in relazione al livello di abilità del bambino; il passaggio da anteriore e posteriore è estremamente facile e veloce e non necessita di alcun strumento particolare.

In 4 misure, per bambini dai 2 ai 18 anni.



14-60 cm



37-125 cm



max. 130 cm



max. 80 kg



Motivare il bambino al cammino

L'utilizzatore viene posizionato al centro di Mustang dove un sistema di supporti per il tronco, il bacino e gli arti superiori fornisce la necessaria stabilità consentendo al bambino di concentrare la sua energia e la sua capacità di controllo sull'azione del cammino.



Sviluppare l'abilità di camminare

Mustang ha una regolazione facile e costante dell'angolazione del supporto anteriore per la ricerca del più efficace baricentro. Una leggera posizione prona, in combinazione con le sospensioni incorporate, stimola la naturale modalità di avanzamento del passo!

Il telaio a forma di U permette di posizionare il bambino in maniera semplice e confortevole. Il supporto avvolgente dona immediata stabilità e comfort.



Pieghevole: facile da trasportare e riporre

Il telaio ripiegabile con grande semplicità, fa sì che Mustang occupi pochissimo spazio quando non viene utilizzato e che sia facilissimo da trasportare.



Telaio

Mustang è disponibile in 4 dimensioni e viene fornito con ruote con freno



Misura 1



Misura 2, 3 e 4 con ruote grandi

Colori telaio


Disponibili in 4 colori



Misura 1 = Giallo



Misura 2 = Blu
Oltremare

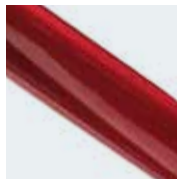

Misura 3 = Rosso



Misura 4 = Blu

Ruote

Mustang viene fornito di serie con varie possibilità di regolazione su tutte le quattro ruote



Stabilizzatore
direzionale



Resistenza regolabile



Freno su tutte le 4
ruote




Blocco



Rilascio

Freno per ruota

Dispositivo unico semplice da inserire

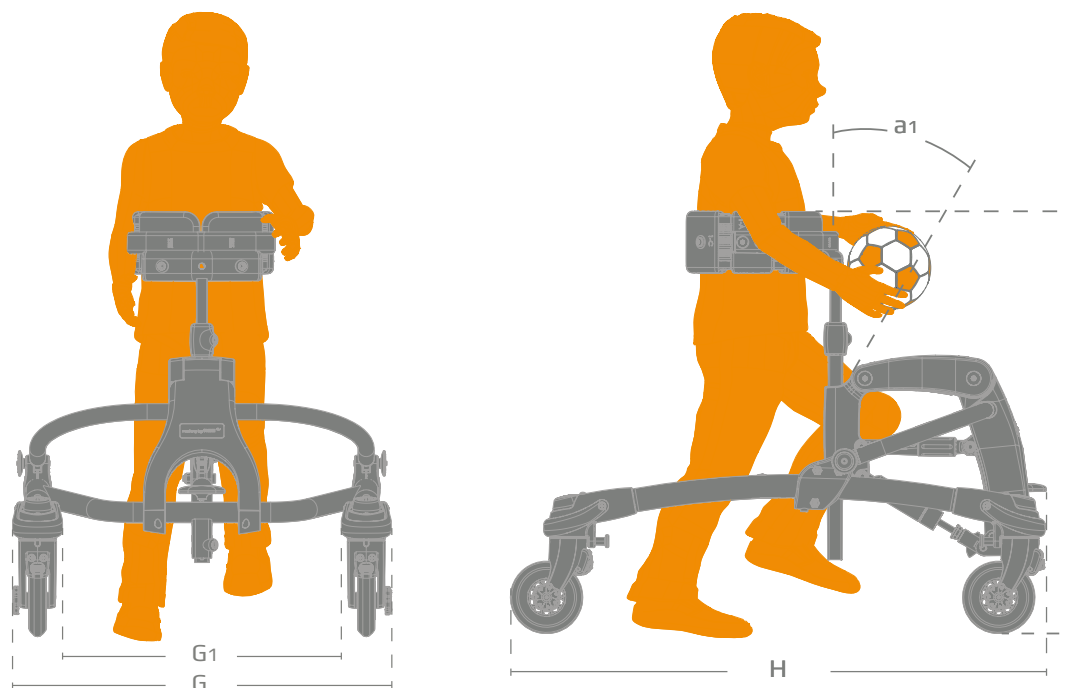

Misure	Mustang	Mustang
	Misura 1	Misura 2
Larghezza totale (G)	52 cm	63 cm
Larghezza interna telaio (G1)	38 cm	45 cm
Lunghezza totale (H)	75 cm	90 cm
Altezza totale (I)	65 cm	80 cm
Altezza seduta dal pavimento (seduta = accessorio)	17-35 cm	33-50 cm
Larghezza tra le maniglie (maniglie = accessorio)	14-35 cm	14-35 cm
Altezza dal pavimento alle maniglie (maniglie = accessorio)	37-58 cm	51-71 cm
Inclinazione della barra centrale (a1)	30°	30°
Raggio di sterzata	0°	0°
Altezza utente, dal pavimento all'ascella	38-65 cm	60-85 cm
Peso, standard senza accessori	10 kg	14 kg
Portata massima	30 kg	40 kg
	Misura 3	Misura 4
Larghezza totale (G)	65 cm	70 cm
Larghezza interna telaio (G1)	50 cm	56 cm
Lunghezza totale (H)	100 cm	110 cm
Altezza totale (I)	105 cm	130 cm
Altezza seduta dal pavimento (seduta = accessorio)	45-68 cm	62-84 cm
Larghezza tra le maniglie (maniglie = accessorio)	14-60 cm	14-60 cm
Altezza dal pavimento alle maniglie (maniglie = accessorio)	65-90 cm	81-125 cm
Inclinazione della barra centrale (a1)	0-25°	0-25°
Raggio di sterzata	55 cm	62 cm
Altezza utente, dal pavimento all'ascella	70-105 cm	87-130 cm
Peso, standard senza accessori	18 kg	19 kg
Portata massima	60 kg	80 kg

Le dimensioni si riferiscono a Mustang con la barra centrale in posizione verticale. Settaggi diversi possono dare dimensioni diverse. Il peso si riferisce all'ausilio senza gli accessori. (Vedere il Buono d'Ordine per scegliere la configurazione più adeguata).



ACCESSORI

**Supporto Toracale**

Per il contenimento del tronco

Misure	Circonferenza interna
S	O: 47-64 cm
M	O: 67-78 cm
L	O: 87-114 cm

**Imbottitura**

Per maggiore comfort

Misure	Dimensioni
1	H:8,5 x W:25 cm
2	H:12 x W:38 cm
3	H:15 x W:49 cm

**Estensione**

Per una superficie di appoggio uniforme

Misure	Dimensioni
unica	H: 11 x W: 5,5 cm

**Maniglia**

Per un maggior controllo delle mani, quando usato anteriormente

Misure	Dimensioni
S	H:11 x W:21 cm
L	H:11 x W:32 cm

**Supporto Addominale**

Per maggior controllo a livello del bacino

Misure	Dimensioni
unica	H:13 x W:19 cm

**Poggia braccia anteriori**

Per l'appoggio dell'avambraccio, aiuta il bambino a stabilizzare tronco e testa

Due misure

**Supporto posteriore**

Aiuta a stabilizzare il bacino. Deve essere utilizzato con la sella.

Misure	Dimensioni
1	H:18 cm (dalla sella) D:13-21 cm (dalla sella)
2	H:20,5 cm (dalla sella) D:16,5-24,5 cm (da sella)

**Supporti antibrachiali anteriori o posteriori**

Aiuta il bambino a stabilizzare tronco e testa

Tre misure

**Fianchetti piccoli**

Aiutano a stabilizzare il bacino. Devono essere utilizzati con la sella.

Misure	Dimensioni
unica	W:18,5-25,5 cm

**Fianchetti grandi**

Aiutano a stabilizzare il bacino. Devono essere utilizzati con la sella.

Misure	Dimensioni
unica	W:25,5-32,5 cm

**Supporto per poggia testa**

Misure	Dimensioni
1	Tubo = L:20 cm
2	Tubo = L:33 cm

**Sella**

Permette al bambino di sedersi quando è stanco

Misure	Dimensioni
1	H:17,5 x D:25,5 cm
2	H:17,5 x D:30,5 cm



Tubo di connessione

Montato tra il fianchetto e il poggia testa

Misura unica



Sedile a imbrago

Aiuta a supportare parzialmente il peso del bambino

Misure Dimensioni
1 W:18 x L:24,5 cm
2 W:18 x L:33 cm



Imbottitura telaio

Per la protezione delle ginocchia

Misura unica



Maniglia di guida

Permette all'assistente di aiutare il bambino nei movimenti (per Mustang mis. 1 e 2)

Misure Dimensioni
unica L: 70 cm



Porta oggetti

Solo per misure 1 e 2

Misure Dimensioni
unica H:14,5 x W:13 cm



Borsa Portaoggetti

Solo per misure 3 e 4

Misure Dimensioni
unica H: 30 x W: 39,5 cm



Separatore per gambe

Aiuta i bambini che tendono ad incrociare le gambe

Quattro misure



Aggancio per caviglie

Una guida utile per una corretta deambulazione

Misure Dimensioni
1 L: 52,5 cm
2 L: 60,5 & 26,5 cm
3 L: 70,5 cm
4 L: 80,5 cm

Legenda

W= Larghezza
L= Lunghezza
H= Altezza
D= Profondità